



İLK YARDIM PLANI GÖZ YARALANMASI



MADDE	GÖZ DURUŞU	DUŞA DEVAM ET	DUŞ SÜRESİ
YABANCI CİSİMLER Örneğin Toz, Kir, Metal ve Ahşap çapakları vb,	braun eyewash	braun eyewash	Yabancı cisim atılana kadar Braun Eyewash Göz Duşu Solusyonu kullanın.
ASİT YARALANMASI	pH Neutral	braun eyewash	Yaklaşık iki dakika boyunca pH Nötr solusyon ile yıkayın, sonrasında rahatsızlık kaybolana kadar veya doktora ulaşana kadar Braun Eyewash Göz Duşu Solusyonu ile durulayın.
ALKALİ YARALANMASI Kalsiyum içeren maddeler hariç Örneğin Kireç ve Çimento	pH Neutral	braun eyewash	Yaklaşık iki dakika boyunca pH Nötr solusyon ile yıkayın, sonrasında rahatsızlık kaybolana kadar veya doktora ulaşana kadar Braun Eyewash Göz Duşu Solusyonu ile durulayın.
DİĞER YARALANMALAR Örneğin Solvet ve Yağ	braun eyewash	braun eyewash	Yanma rahatsızlık durana kadar veya doktora ulaşana kadar Braun Eyewash Göz Duşu Solusyonu ile durulayın.
DERİ YARALANMALAR Asitler, Bazlar ve Kimyasallar	pH Neutral	braun eyewash	Yaklaşık iki dakika boyunca pH Nötr solusyon ile yıkayın, sonrasında rahatsızlık kaybolana kadar veya doktora ulaşana kadar Braun Eyewash Göz Duşu Solusyonu ile durulayın.

!!! ÖNEMLİ !!!

- Yaralanma halinde kapağı ön yönünde çevirerek açın ve göz fincanını gözüne değecek şekilde bastırmadan tutun.
- Şişeyi yavaşça sıkın, solusyon fincana dolacak ve tahliye deliklerinden dışarı akacaktır.
- Gözünüzdeki acı ve yanma dursa bile tıbbi yardım isteyin.
- Sağlık kuruluşuna gidene kadar yıkama işlemine devam edin. Şişeler tek kullanımlık olup kapağı açıldıktan sonra bitene kadar kullanılmalıdır.
- Açık kapaklı olan ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanmayın.